


ケトスキャンアプリのFatSecret同期化方法

※FatSecretと同期化することで、FatSecretのデータがケトスキャンアプリに自動的に反映されるため、その都度入力せずに、**測定前に食べた炭水化物、脂質、タンパク質の量と消費/摂取カロリー**をケトスキャンの測定結果と一緒に確認することができますようになります。

1. メールアドレスを使用しFatSecretアカウントを作った場合


①環境設定を選択

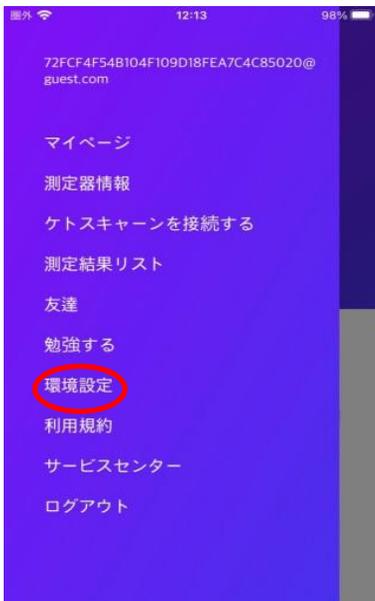


②アプリケーションの同期化を選択



③FatSecretを選択

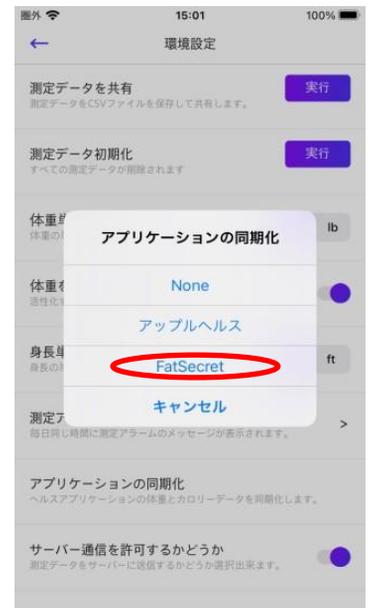

④Member nameとPasswordを入力し、Sign Inを押す

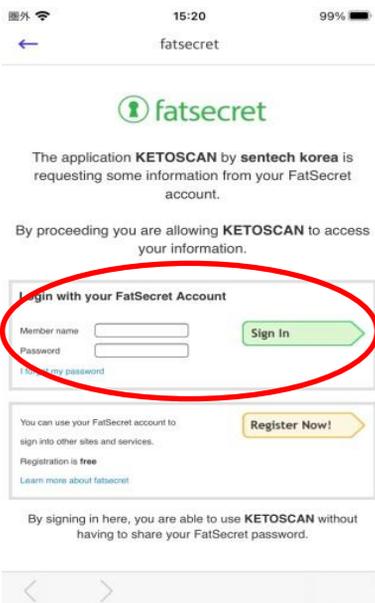

⑤アプリケーションの同期化に🟢が表示されたら、同期化完了




FatSecret同期化中に測定すると、以下のように表示されます。




2. FatSecretにFacebook/Gmail/Apple IDでサインインした場合

※FatSecretにFacebookもしくはGmailアカウントを使用し、登録した場合は、パスワードを設定するタイミングがないため、メールアドレスで登録した場合のように、Member nameとPasswordを入力し、ケトスキャンアプリと同期化することができません。そのため、パスワードを新たに設定する必要があります。


①前ページの④のページから、I forgot my passwordを選択

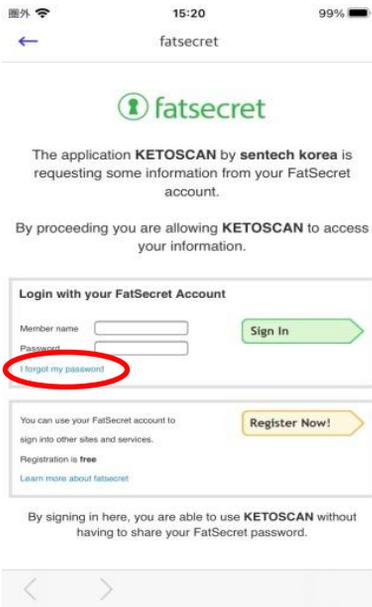


②Facebook/Gmail/AppleIDに登録されたEmailかFatSecretのMember Nameを入力し、画像内のアルファベットを入力し、Continueを選択

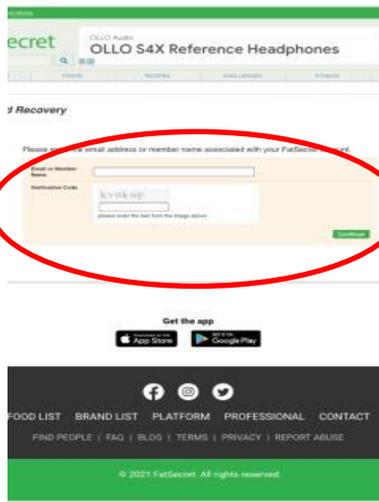


③Password reset email sentの画面が表示されたら、送られてきたメールを確認

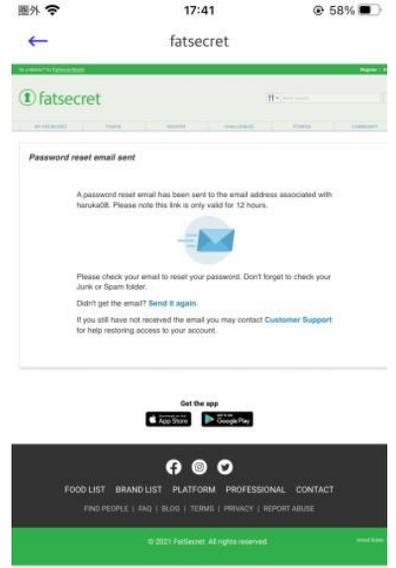

④Reset Passwordを選択

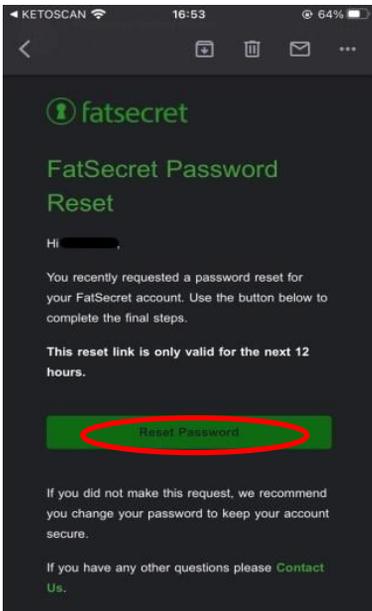

⑤新しいパスワードを作成し、進むを選択

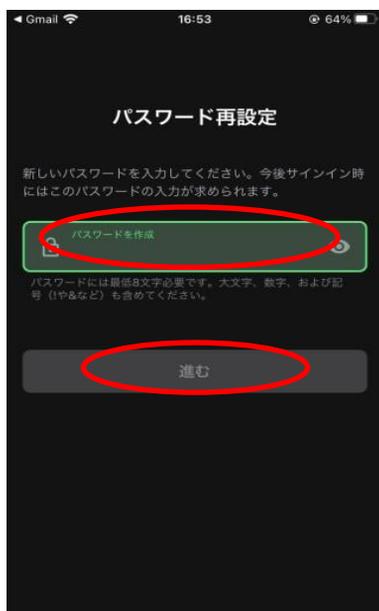


⑥おめでとう！の表示が出たら、前のページの④のページからMember nameとPasswordを入力し、ケトスキャンアプリと同期化



アプリケーションの同期化ができない場合

1. ケトスキャンアプリの【アプリケーションの同期化】→【FatSecret】でMember NameとPasswordを入力後にSign Inを押してもパスワードが消えた状態の画面で停止し、同期化ができない。

- ①FatSecretに登録時に送られてくる「FatSecretの入会の確認」というメールのリンクをクリックし、登録を完了させてください。
- ②FatSecretのアプリで正常にログインできるか確認してください。
- ③再度ケトスキャンアプリでアプリケーションの同期化を行ってください。

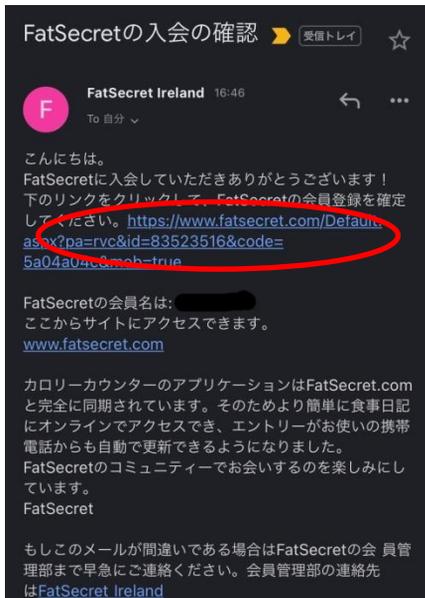

2. 「FatSecretの入会の確認」というメールのリンクをクリックしても、ログインができない。

パソコンのFatSecretのサイトでログインをした後、もう一度ケトスキャンアプリでアプリケーションの同期化を行ってください。